

Множество манипул для комфортного лечения широкого спектра косметических, гинекологических и эстетических нарушений

Для получения дополнительных сведений посетите сайт: www.petitlady.net

УНИКАЛЬНЫЙ ДВОЙНОЙ РЕЖИМ

Методика двойного воздействия

Сначала происходит излучение в высокочастотном короткоимпульсном режиме, который вызывает абляцию и фототермическое воздействие на эпителий. затем устройство автоматически излучает неаблятивный длинный импульс (1000 мс = 1 с), который стимулирует выработку коллагена в слизистой оболочке влагалища.

Гистология стенок влагалища

Эпидермальный компонент слизистой оболочки толще, плотнее, содержит меньшее количество кератина и имеет более выраженную структуру. Также наблюдается уплотнение слоя соединительной ткани собственной пластинки слизистой оболочки. Все это свидетельствует о достигнутом эффекте подтяжки и уплотнения тканей стенок влагалища.

Процедура «Петит Леди» подходит для лечения различных нарушений


Подтяжка после растяжения / опущения стенок влагалища, вульво-вагинальное омоложение

- » Устранение послеродовых вагинальных изменений
- » Лечение атрофического вагинита
- » Лечение синдрома вагинальной релаксации
- » Подтяжка преддверия влагалища
- » Общая подтяжка влагалища
- » Улучшение ощущений от половой активности
- » Лечение стрессового недержания
- » Устранение сухости влагалища
- » Устранение ощущение жжения
- » Лечение нарушений пигментации вульвы
- » Удаление растяжек
- » Проведение других эстетических процедур

1 этап: Короткоимпульсный режим 2 этап: Длинноимпульсный режим (1с)



Окраска по Ван Гизону, масштаб 1 x 100, возраст 38 лет

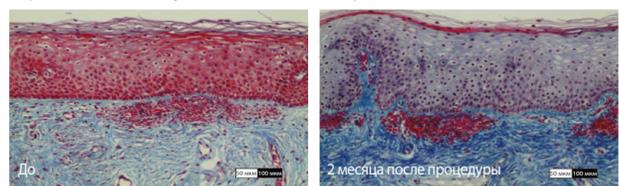

Снимки: Д-р Min Seok Lee, гинеколог, женская клиника Sophie-Marceau, Юж. Корея

«Процедура особенно подходит пациенткам во время менопаузы, поскольку лазерное ремоделирование тканей оказывает общее омолаживающее воздействие, а также благоприятно воздействует на сексуальную сторону жизни пациентки.»

Доктор Hyung Keun Lee,
Главный врач центра лазерной косметической хирургии RIZ, Сеул, Республика Корея

LUTRONIC®

ПОЧЕМУ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ACTION II?

- Множество показаний и способов применения в эстетической косметологии и гинекологии
- Фракционное воздействие
- Режим длительных импульсов до 1000 мс
- Режим «Shining Peel» для бережного омоложения кожи

ACTION II – графический пользовательский интерфейс



ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Тип лазера	Er:YAG 2940 нм								
Режим работы	<table border="0"> <tr> <td>Дерматология</td> <td>Стандартный режим Длинно импульсный режим Фракционный режим</td> <td>  </td> </tr> <tr> <td>Гинекология (Режим "Petit Lady")</td> <td>Короткоимпульсный режим Длинноимпульсный режим Двойной режим</td> <td>  </td> </tr> </table>	Дерматология	Стандартный режим Длинно импульсный режим Фракционный режим	  	Гинекология (Режим "Petit Lady")	Короткоимпульсный режим Длинноимпульсный режим Двойной режим	  		
Дерматология	Стандартный режим Длинно импульсный режим Фракционный режим	  							
Гинекология (Режим "Petit Lady")	Короткоимпульсный режим Длинноимпульсный режим Двойной режим	  							
Характеристики луча	Цилиндрический с плоской вершиной								
Ширина импульса	Стандартный режим: 250 мс Длинноимпульсный режим: 1000 мс								
Манипула	<table border="0"> <tr> <td>Фракционная манипула</td> <td>12 мм Ø, 9x9 мм</td> </tr> <tr> <td>Зум-манипула (опция)</td> <td>1 ~ 7 мм Ø</td> </tr> <tr> <td>Манипула для режима "Shining peel" (опция)</td> <td>14 мм Ø</td> </tr> <tr> <td>Манипула для режима "Petit Lady"</td> <td>360° 90°</td> </tr> </table>	Фракционная манипула	12 мм Ø, 9x9 мм	Зум-манипула (опция)	1 ~ 7 мм Ø	Манипула для режима "Shining peel" (опция)	14 мм Ø	Манипула для режима "Petit Lady"	360° 90°
Фракционная манипула	12 мм Ø, 9x9 мм								
Зум-манипула (опция)	1 ~ 7 мм Ø								
Манипула для режима "Shining peel" (опция)	14 мм Ø								
Манипула для режима "Petit Lady"	360° 90°								
Автоматическое распознавание манипул	Да								
Частота импульсов	Одиночный импульс 1, 2, 5 и 10 Гц								
Пользовательский интерфейс	8-дюймовый ЖК-дисплей / Сенсорный экран								
Память	Процедура "Shining Peel" & 8 ячеек памяти								
Пилотный луч	Диодный, 655 нм (красный), 1 мВт, регулируемая яркость								
Размеры (мм) / Без манипулятора	872 (Высота) x 656 (Длина) x 295 (Ширина)								

ООО «Белла-систек»

Эксклюзивный представитель LUTRONIC в России и СНГ
121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8 (ТЦ «Lotte Plaza»), 3 этаж, офис 23
Телефон: +7 (495) 255-07-82
E-mail: info@bella-systech.ru
www.bella-systech.ru



©2017, группа компаний LUTRONIC. Все права защищены. LUTRONIC, логотип компании, PICOPLUS, enCurve, LASEMD, SPECTRA XT, SPECTRA, CLARITY, INFINI, ACTION II, PETIT LADY, ACTION II, ADVANTAGE POWER+, eCO2, HEALITE II, SOLARI, MOSAIC, ACCUSCULPT II являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками группы компаний LUTRONIC. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сам продукт или его использование защищены одним или несколькими американскими и иностранными патентами или заявками на получение патента.

LUTRONIC®

LUTRONIC

ACTION II
Иновация 5 в 1:
эрбиевый лазер Er:YAG
для эстетической
косметологии

ФРАКЦИОННЫЙ ЛАЗЕР
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ КОЖИ




ACTION II

ACTION II – новейший многофункциональный эрбиевый фракционный лазер Er:YAG, применяемый в эстетической косметологии. Если вы работаете с ACTION II, эстетическая косметология больше не сводится к классическим лечебным процедурам и лазерной коагуляции.

Устройство работает в обычном – 250 мс и в длинноимпульсном – 1000 мс режимах. Это расширяет возможности применения устройства. Аппарат деликатно доставляет тепловую энергию в ткани. Специализированная фракционная технология и процедура «Shining Peel» обеспечивает бережное и эффективное омоложение, что придает коже естественное здоровое сияние.

Процедура быстрая и не доставляет дискомфорта в отличие от других лазеров, что позволит Вам удовлетворить ожидания даже самых взыскательных клиентов и преумножить Ваш доход.

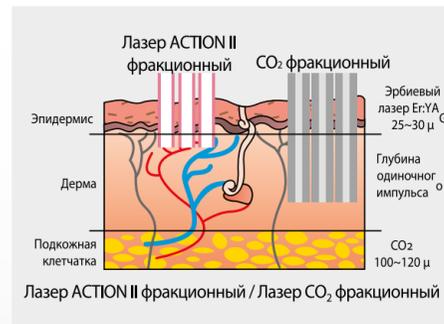

Щадящие процедуры с применением различных манипулов в косметической гинекологии и эстетической дерматологии для оздоравливающего и омолаживающего эффекта

Процедура «Петит Леди» (Petit Lady™) на лазере ACTION II

Послеродовые и возрастные изменения могут негативно сказываться на состоянии влагалища и вульвы, снижая качество сексуальной сферы в жизни женщины.

Процедура «Петит Леди» (Petit Lady™) на устройстве ACTION II – альтернатива всем известным видам процедур, которая подходит для решения широкого спектра гинекологических нарушений.

В отличие от процедуры лазерной вагинопластики (влагалищная хирургия с использованием диодного или CO2 лазера), процедура «Петит Леди» является нехирургической и неинвазивной.

Воздействие энергии эрбиевого лазера ведёт к точной абляции и минимальной коагуляции тканей. После применения эрбиевого лазера процесс реэпителизации слизистой оболочки влагалища происходит значительно быстрее, поэтому применение ACTION II в гинекологии становится более обоснованным в плане безопасности и комфортности процедуры.

Функция «двойного режима» позволяет использовать высокочастотный короткоимпульсный и длинноимпульсный режимы одновременно. Использование этого режима позволяет добиться контролируемого и более глубокого сопутствующего термального воздействия на ткани слизистой оболочки стенок влагалища. Запатентованный дизайн специальных манипулов обеспечивает высокую эффективность и позволяет проводить процедуры с большей комфортностью для пациента.

ДАЙТЕ ВАШИМ КЛИЕНТАМ ТОТ РЕЗУЛЬТАТ, О КОТОРОМ ОНИ МечТАЮТ

ОБЩИЕ ФРАКЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Фракционный режим двойного действия

Фракционный лазер возможно использовать в двух режимах: собственно фракционном и длинноимпульсном режиме. Фракционная технология ACTION II позволяет тщательно контролировать глубину абляции и термальное воздействие на зону коагуляции, делая процедуру совершенно безболезненной. Фракционный лазер в режиме длительных импульсов способствует максимально быстрому проведению процедуры и ускорению процесса заживления кожи.

Технология многократного лазерного воздействия ACTION II


Специализированная технология многократного лазерного воздействия ACTION II обеспечивает регулируемую глубину абляции и термальное воздействие на зону коагуляции. Возможно применение до 10 импульсов по одному нажатию клавиши.

Технология динамического перемещения


Уникальная технология динамического перемещения позволяет сократить время процедуры.

РЕЖИМ ТРОЙНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ



- » Обычный режим
- » Фракционный режим
- » Длинноимпульсный режим (1000 мс), доступны фракционные импульсы

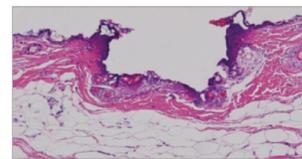

ACTION II: фракционная манипула: 15мДж x 8 многократных импульсов
Клинические снимки, Д-р С.Х. Парк, пластический хирург, Университет Кореи

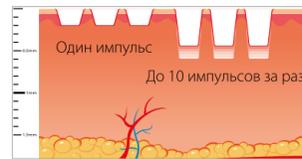

Технология многократного лазерного воздействия

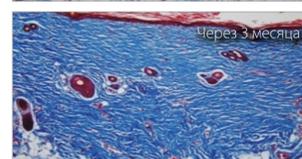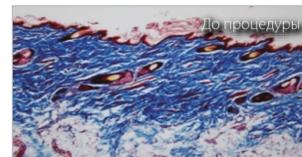

Общее число волокон коллагена эластична увеличилось. Фракционная манипула: 15мДж x 8 многократных импульсов
Клинические снимки, Д-р С.Х. Парк, пластический хирург, Университет Кореи

ПРОЦЕДУРА «SHINING PEEL» ДЛЯ БЕРЕЖНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ

«Shining Peel» – это абсолютно новая процедура лазерного пилинга для омоложения кожи, удаления морщин и сужения расширенных пор. Для её проведения не требуется анестезия или прочие инъекции. Процедура стимулирует перестройку коллагеновых волокон путём передачи коже достаточного количества лазерной энергии без абляции эпидермиса.

Шансы развития воспалительной гиперпигментации минимальны, поскольку во время процедуры дерма остаётся незатронутой; отшелушивание происходит на внешнем уровне эпидермиса. Процедура «Shining Peel» возвращает коже её прежнюю молодость.



Настраиваемый прицельный луч

Яркость красного диода 650 нм регулируемого луча может быть изменена в соответствии со степенью поражения или оттенком кожи.

ПОКАЗАНИЯ

- » Омоложение кожи с процедурой «Shining Peel»
- » Фракционное омоложение двойного действия
- » Коррекция рубцов (рубцы постакне, гипертрофические, хирургические, ожоговые)
- » Расширенные поры, неровный тон кожи, морщины
- » Невусы, эпидермальная пигментация: лентиго, веснушки, себорейный кератоз, синингоцистоаденомы, кондиломы



Клинические снимки, Д-р Д.Х. Ким, Корея



Клинические снимки, Д-р Д.Х. Ким, Корея



Клинические снимки, Д-р Д.Х. Ким, Корея



Клинические снимки, Д-р Д.Х. Ким, Корея

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕДУРЫ «ПЕТИТ ЛЕДИ»



МАНИПУЛА PETIT 360° ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ ПОДТЯЖКИ ВЛАГАЛИЩА

Деликатная абляция в сочетании с фототермальным воздействием множества лазерных микроимпульсов на слизистую оболочку влагалища стимулируют процессы ремоделирования волокон коллагена, что ведёт к сужению стенок влагалища. Проведение процедуры позволяет добиться более молодого и здорового состояния тканей влагалища.



Манипула Petit 360° рассеивает энергию лазера во всех направлениях

МАНИПУЛА PETIT 90° ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ

Применение манипулы Petit 90° позволяет добиться подтяжки внутритазовой фасции, а также связок и тканей слизистой оболочки влагалища, что ведет к сужению переднего отдела влагалища и улучшению состояния, связанного со стрессовым недержанием.

